



OPENCAST 専用オーブン

高電圧受電契約(50kV以上)している事業用・自家用電気工作物に接続して使用してください。
230V/2kVAに対応したトランス(昇圧器)を介しての使用を推奨します。



OPENCASTの全サイズ対応

約5～6分でOPENCASTを成形可能にします。

微調整のための再加熱も可能な加熱室

OPENCASTの成形に適した温度に設定できます。
最大95℃の設定が可能で、サーモスタットにより過剰な温度上昇を防止します。

仕 様	
電源	230 V
定格	1.84 kW 8A 50 / 60 Hz
温度調節	最大 95 ℃
タイマー	30 秒 ～ 90 分 30 秒
外形寸法	幅 805 × 奥行き 470 × 高さ 440 mm
加熱室の寸法	幅 670 × 奥行き 330 × 高さ 190 mm
総重量	30 kg

OPENCASTを温めるために、電子レンジを使用しないでください。

【製造販売元】

株式会社 JMC

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-5
TEL 045-273-3410 FAX 045-471-5270
www.jmc-rp.co.jp/
OPCT000-CA-02



【販売元】

JMC

通気性

視える

看える

洗える

快適性

診える

痒いところに
手が届く

再加熱により
巻き直し・調整が可能



OPENCAST



OPENCASTとは

OPENCASTは、網目状のデザインのギプスです。
丈夫で肌に優しい素材で作られており、患者は快適な日常生活を送ることができます。
ギプスが不要になったときには、医療機関で安全に外すことができます。

洗える

治療のため数週間ギプスを装着していても、OPENCASTはシャワーを浴びることができます。



快適性

OPENCASTは、通気性がよく、皮膚を衛生的に保つことができます。



診える

OPENCASTの網目形状により、皮膚の状態を視覚的に確認できます。創傷に合わせ、開窓することもできます。



OPENCAST 成形手順

(例: 上肢)

動画でもご確認いただけます。
www.jmc-rp.co.jp/business/md/



1

オープンキャスト

クランプ

1枚のOPENCASTの両側にクランプを取り付けます。
※SA-Mは1枚の片側のみ取り付けます。

2

専用オープンでOPENCASTを加熱します。(接皮面をオープン内の網に触れないよう注意)

3

皮膚を保護するため、適当な幅と間隔でストッキネットを巻きます。

4

患部に巻き付け、クランプで固定しながら形状を整えます。

5

透明ラップ等を巻き付けOPENCASTが固まるのを待ちます。

6

透明ラップを外し、OPENCASTの隙間からストッキネットを除去します。

7

皮膚とOPENCASTの間に適度な空間があることを確認する。

下肢の場合

OPENCASTを装着して歩行する際は、破損を防ぐため別売のヒールシューズ等を使用してください。

OPENCAST規格

患者の体格、固定部位の大きさに合わせて、7種類のサイズを用意しています。

仕 様			
販売名: オープンキャスト 分類: 一般医療機器 一般的名称: ギプス包帯 医療機器届出番号: 14B1X10020000002			
品 番	サイズ (mm)	セット組み	処置範囲
CM-03	幅 131 × 長さ 342 × 厚さ 8.4	2枚1セット	CM-03~08
CM-04	幅 148 × 長さ 391 × 厚さ 8.6		
CM-05	幅 167 × 長さ 436 × 厚さ 8.8		
CM-06	幅 183 × 長さ 480 × 厚さ 9.5		
CM-07	幅 205 × 長さ 528 × 厚さ 9.6		
CM-08	幅 229 × 長さ 583 × 厚さ 9.6		
SA-M	幅 301 × 長さ 264 × 厚さ 7.8	1枚1セット	SA-M

特 徴

再加熱により巻き直し・調整が可能です。

